

# HIPPOCAMPE®

MARATHON® e Trail




## Hippocampe Marathon e Trail

Istruzioni per l'uso e il montaggio

M: 0040-TM-03-NO

L: 0040-TL-03-NO

XL: 0040-TX-03-NO

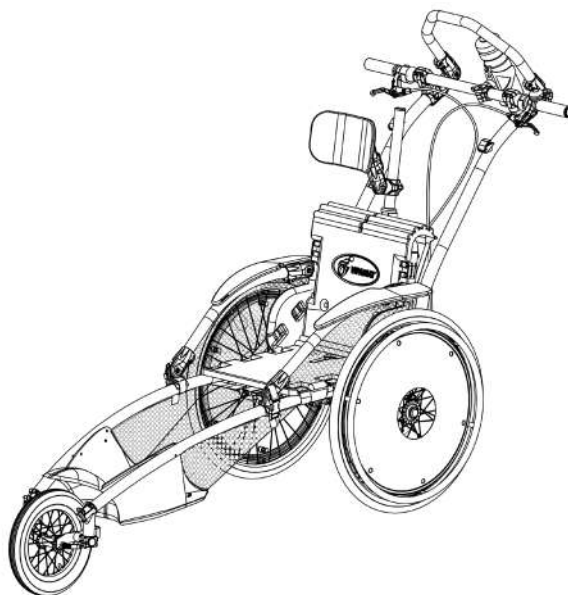

*Nel disegno, il poggiatesta regolabile e un'opzione*

VIPAMAT


3, rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)  
Tél : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81  
[www.vipamat.com](http://www.vipamat.com) - [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com)

**Complimenti!** Hai appena acquistato Hippocampe Marathon et Trail di Vipamat. Hippocampe è perfetta per la corsa e offre a tutti la possibilità di partecipare ad attività sportive. A seconda degli accessori scelti, si può adattare a percorsi accidentati tipici della corsa o a passeggiate in mezzo alla natura.

## Sommario

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <b>1 Com'è fatto Hippocampe</b> .....                      | p2  | <b>3.5 Montaggio della rete di protezione</b> .....       | p15 |
| <b>2 Informazioni legali e di sicurezza</b> .....          | p4  | <b>3.6 Montaggio della poggiatesta regolabile</b> .....   | p17 |
| 2.1 Precauzioni d'uso.....                                 | p4  | <b>3.7 Montaggio della cintura addominale</b> .....       | p19 |
| 2.2 Condizioni di garanzia e di conformità.....            | p5  | <b>3.8 Montaggio dell'imbracatura mista</b> .....         | p21 |
| 2.3 Manutenzione e cura.....                               | p5  | <b>3.9 Installazione della sbarra di spinta</b> .....     | p23 |
| <b>3 Montaggio di Hippocampe</b> .....                     | p7  | <b>3.10 Montaggio della protezione dalle piogge</b> ..... | p25 |
| 3.1 Montaggio schienale fisso in altezza o regolabile..... | p7  | <b>3.11 Montaggio dell'ombrello</b> .....                 | p27 |
| 3.2 Installazione della coppia di ruote Marathon.....      | p9  | <b>3.12 Montaggio della maniglia barra manubrio</b> ..... | p29 |
| 3.3 Montaggio della coppia di braccioli.....               | p11 | <b>3.11 Montaggio dell'opzione Cuscino Stabile</b> .....  | p31 |
| 3.4 Montaggio delle reti da bracciolo.....                 | p13 |   |     |

## 1 Com'è fatto Hippocampe Marathon et Trail

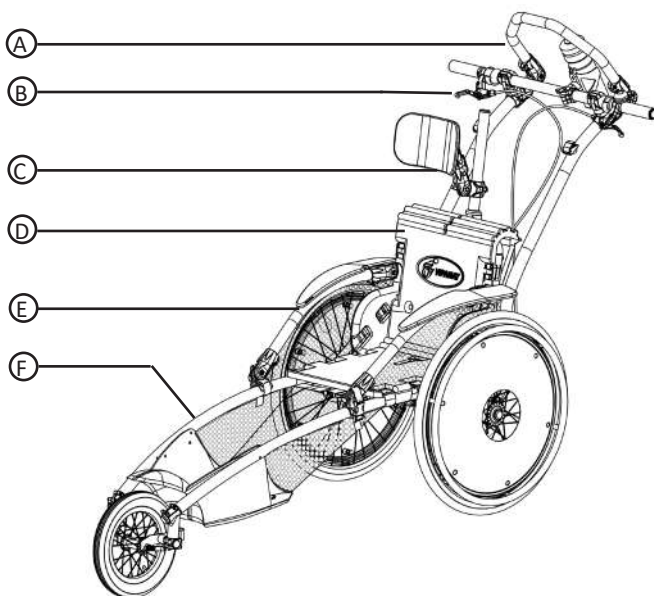

*Nel disegno, il poggiatesta regolabile e un'opzione*



Hippocampe Marathon et Trail è disponibile in 3 taglie: M, L e XL

- |  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| (A) Sbarra di spinta                                   | (B) Maniglie dei freni   | (C) Poggiatesta regolabile (opzione) |
| (D) Schienale fissa in altezza e reclinabile (opzione) | (E) Coppia di braccioli (regolabile, retrattile e orientabile) | (F) Telaio di Hippocampe             |

## IMPORTANTE

Conserva con cura questo manuale.

**Norme e consigli contenuti nel manuale vanno rispettati con la massima attenzione.**

### Gli accessori di Hippocampe Marathon et Trail:




Schienale regolabile in  
altezza e reclinabile



Poggiatesta regolabile



Cintura addominale

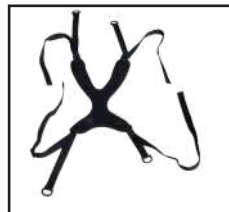

Imbracatura mista



Copertura termica



Borsa da schienale



Coppia di ruote Trail



Borsa da trasporto



Cuscino Stabilo  
Comfortable Plus Duo



Protezione dalle piogge



Ombrello



Maniglia barra manubrio



Borsa da ruote 24"

## 2 Informazioni legali e di sicurezza

### 2.1 Precauzioni d'uso

1. Norme e consigli contenuti in questo manuale vanno rispettati con la massima attenzione.



Prima di ogni utilizzo della sedia a rotelle, controllare che le ruote siano correttamente bloccate e saldamente attaccate al telaio. (vedi 3.2)

2. Controllare che la ruota anteriore sia ben fissata.

3. Controllare che le fibbie di chiusura del sedile siano bloccate per bene.

4. Prima di utilizzare la carrozzina controllare che i freni funzionino correttamente: bloccare i freni a disco con i 2 pulsanti di bloccaggio situati sul manubrio. Accertarsi che la carrozzina sia bloccata spingendola leggermente.

5. Prima di utilizzare la sedia controllare che la sbarra di spinta sia inserita correttamente facendo pressione su tutte le clip e controllando le uscite dei pezzi di raccordo (vedi 3.9).

6. Quando si usa Hippocampe Marathon et Trail è necessaria la presenza di un accompagnatore che abbia la capacità di guidare, spingere e frenare la carrozzina.

7. Installare le reti di protezione e verificare il corretto posizionamento delle mani e dei piedi dell'utente prima e durante la gara.

8. Durante l'uso, per motivi di sicurezza, l'accompagnatore avvolgerà il cinturino rosso intorno al polso (l'altra estremità è fissa sull'asse del telaio).

9. Se si cambia accompagnatore, bloccare la sedia su un terreno piano e assicurarsi che il nuovo accompagnatore si passi il cinturino rosso intorno al polso.

10. Per una maggiore sicurezza, il passeggero si deve sedere in fondo al sedile, con la schiena appoggiata allo schienale.

11. Durante le corse e gli eventi sportivi si consiglia di usare l'accessorio cintura mista o cintura addominale per garantire la stabilità del passeggero.

12. Non esercitare una pressione eccessiva sulla sbarra di spinta quando si solleva la ruota anteriore per girare.

13. Per motivi di sicurezza, è obbligatorio indossare un casco.

14. Hippocampe è progettato per ospitare un solo passeggero di un peso massino di 100 kg.

15. Tenere stabile la carrozzina quando si svolta.

16. Per motivi di sicurezza non usare Hippocampe se l'inclinazione della pendenza è superiore al 7°.

17. Non superare ostacoli superiori a 10 cm con Hippocampe.

18. Non superare ostacoli dal basso quando si usa Hippocampe.

19. Non mettersi in piedi sul sedile o sul poggiatesta.

20. Si sconsiglia di usare Hippocampe se una ruota è bucata o sgonfia.

21. Non apportare modifiche a Hippocampe usando pezzi diversi da quelli forniti da Vipamat.

22. Non usare Hippocampe se uno dei pezzi è difettoso.

23. Sedile e schienale di Hippocampe sono conformi alla norma M1. L'articolo va comunque tenuto lontano dalle fiamme.

24. Se hai dubbi sulla piena sicurezza di Hippocampe, smetti subito di usarla e contatta il servizio clienti di Vipamat allo +33 (0) 2 97 86 24 87 o via email al [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com).



## 2.2 Dichiarazione di conformità e Condizioni di garanzia

In quanto costruttore, Vipamat dichiara che il dispositivo medico di classe 1 Hippocampe Marathon et Trail e i suoi accessori per dispositivi medici sono conformi al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e rispettano le disposizioni previste dalla direttiva europea 93/42/CEE e del libro II del Codice della Sanità Pubblica. Su questo articolo offriamo una garanzia di 2 anni "pezzi di ricambio e manodopera", a partire dalla data d'acquisto (fa fede la fattura).

La garanzia assicura la sostituzione delle parti difettose, ma non si applica nei casi di uso improprio e non comprende l'usura dei pezzi dovuta all'utilizzo della carrozzina. Considerate le situazioni nelle quali si può usare Hippocampe, il ciclo di vita previsto è di 4 anni a partire dalla data d'acquisto.

Il numero di serie dell'articolo è inciso sull'asse posteriore del telaio. Ogni accessorio ha il suo numero di serie inciso sull'articolo. Può anche essere stampato sull'etichetta attaccata alla confezione o all'accessorio.

Per smaltire il Hippocampe, vai in una discarica e mettilo nella giusta categoria di riciclaggio.










## 2.3 Manutenzione e cura di Hippocampe

Si consiglia di pulire Hippocampe con un panno umido. Se Hippocampe è troppo sporca (fango, terra, etc.), è possibile sciacquarla con acqua pulita evitando i sistemi di freno a disco.

### **Manutenzione dei freni a disco:**

I freni a disco richiedono poca manutenzione. Assicurarci, comunque, di non gettare mai olio o altre sostanze lubrificanti sul disco o sulle pastiglie.

Le pastiglie sono coperte da una guarnizione: quando questa è completamente usurata, le pastiglie vanno a sfregare sul disco e lo azionano. Occorre dunque procedere al cambio delle pastiglie. Ti consigliamo di contattare il tuo rivenditore o la società Vipamat per sostituire i pezzi usurati. L'azienda Vipamat declina ogni tipo di responsabilità per danni legati a questa negligenza.

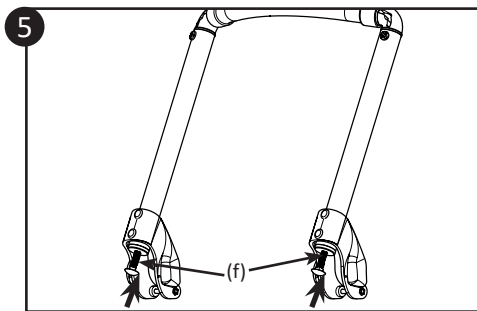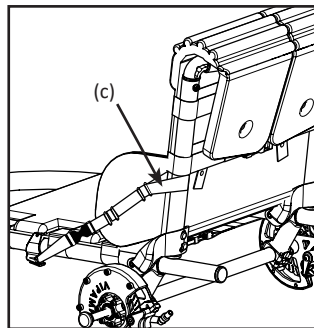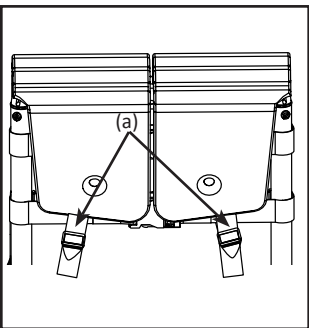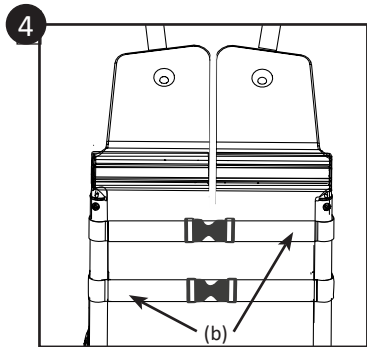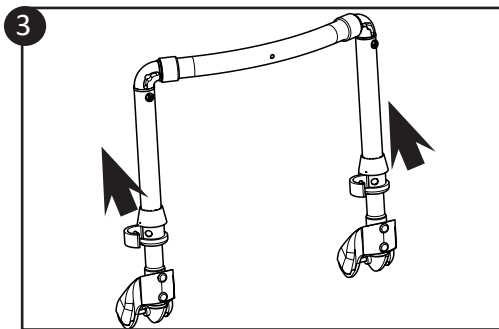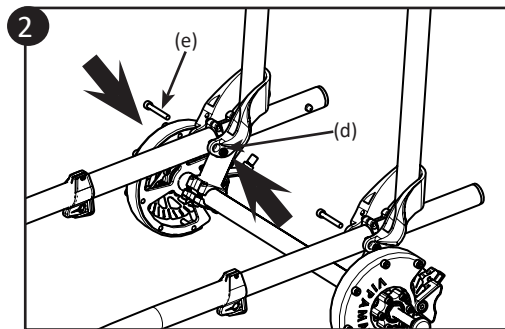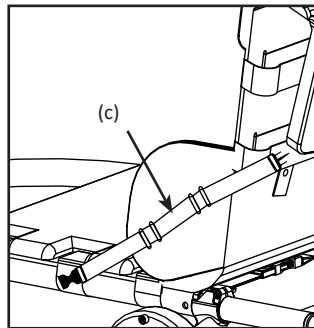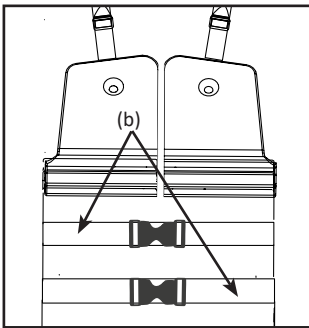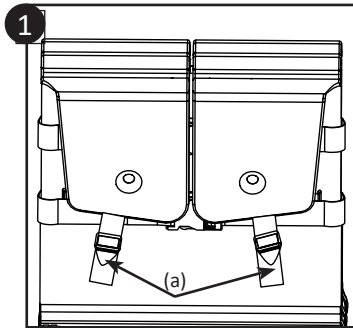

## 3 Montaggio di Hippocampe Marathon et Trail

### 3.1 Montaggio dello schienale fisso in altezza e reclinabile o dell'opzione dello schienale regolabile in altezza e reclinabile (0004-00-01) (0005-00-01)

① Allenta le fasce delle cinghie verticali (a), quindi sgancia le cinghie (b) e le 2 cinghie laterali (c) del sedile di Hippocampe.

② Per fissare lo schienale sui tubi del telaio: sistemare lo schienale sui tubi del telaio, inserire i dadi (d) nell'apposito alloggiamento e avvitare le viti (e) con la chiave a brugola in dotazione.

#### Controlli:

lo schienale deve riuscire a inclinarsi in avanti e le viti (d) devono uscire dai dadi (e) di circa 3 mm.

#### ③ Regolare l'altezza, valido solo per lo schienale regolabile:

Apri il sistema push-lock, regola lo schienale all'altezza desiderata, quindi blocca il push-lock.

④ Rimetti a posto tutte le cinghie del sedile di Hippocampe:

- Avvolgi le 2 cinghie larghe orizzontali (b) e stringile per bene con i passanti delle cinghie senza forzare.
- Fai passare le 2 fasce verticali (a) nelle cinghie e stringi senza forzare.
- Avvolgi le piccole cinghie laterali (c) intorno al tubo dello schienale.



Se è necessario montare un poggiatesta o una coppia di braccioli, passare alle pagine seguenti prima di sostituire le cinghie.

#### Controlli:

Controlla che le fibbie delle cinghie larghe (b) (40 mm) rimangano chiuse quando tiri da ciascun lato della cinghia.

Controlla che le cinghie (b) siano ben tese e passino attraverso le fessure del sedile.

Controlla che le 2 fasce verticali (a) del sedile attraversino i passanti delle cinghie e siano tese.

Controlla che le cinghie laterali oblique (c) di ciascun lato del telaio ruotino intorno al tubo verticale dello schienale

e siano tese quando apri lo schienale.



⑤ Per modificare l'inclinazione dello schienale, regolare il serraggio delle 2 viti (f) alla base dello schienale. Attenzione: le 2 viti devono fuoriuscire della stessa lunghezza.

*Il numero di serie dello schienale fisso o regolabile è inciso sulla parte bassa di uno dei tubi verticali.*



#### Codice QR :

I tutorial per il montaggio di queste opzioni sono disponibili in video su Youtube.






#### Nome dei tutorial :

TUTO #2 : Fixed backrest - Dossier Fixe

TUTO #3 : Adjustable backrest - Dossier Réglable



SCAN ME

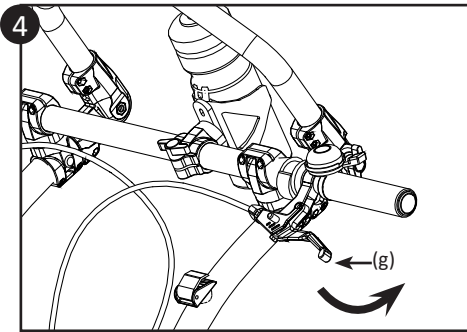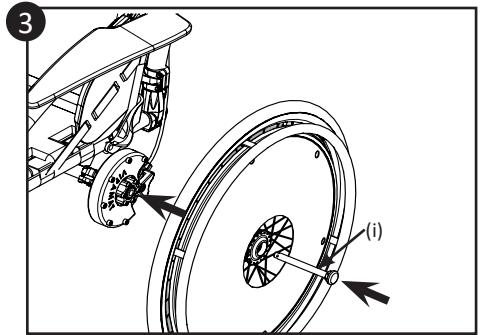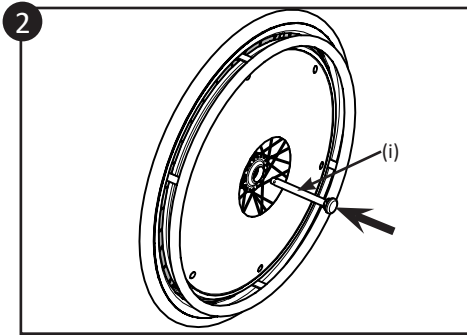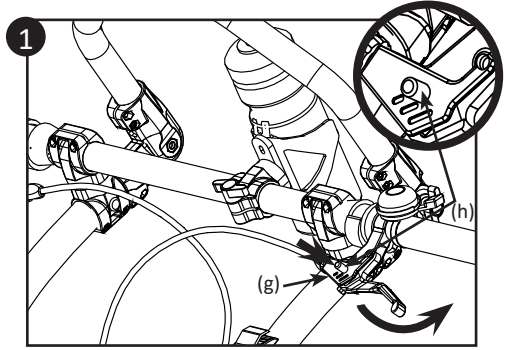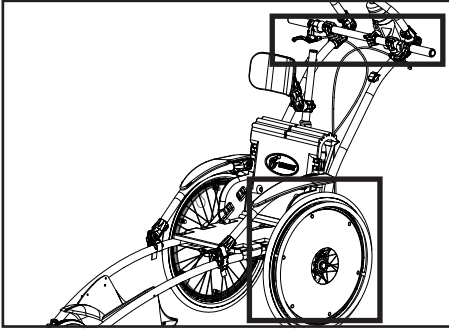

## 3.2 Installazione della copia di ruote Marathon e dell'opzione ruote Trail (0042-00-01) (0047-00-01)








- 1 Bloccare i freni premendo sulla maniglia (g), quindi premendo sul pulsante di bloccaggio a molla (h) situato sul manubrio per ciascun freno.
- 2 Appoggiare al centro dell'asse, quindi inserire il semiasse (i) nel cerchione.
- 3 Inserire la ruota con il semiasse (i) nell'asse del telaio premendo al centro del semiasse (i) e facendo girare leggermente la ruota in modo che si inserisca nel mozzo.
- 4 Sbloccare i freni a disco esercitando una pressione sulle maniglie (g) per poi liberarle di nuovo.

### Controlli:

- Controllare che le ruote siano bloccate attivando i due pulsanti (h) di bloccaggio a molla situati sul manubrio e premendo sul sedile. Il sedile deve risultare completamente immobile.



Controllare periodicamente la pressione delle ruote. Le indicazioni di pressione si trovano sulle ruote.

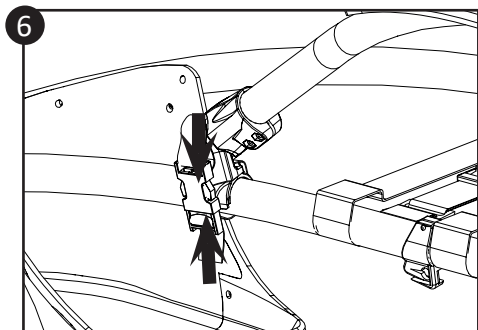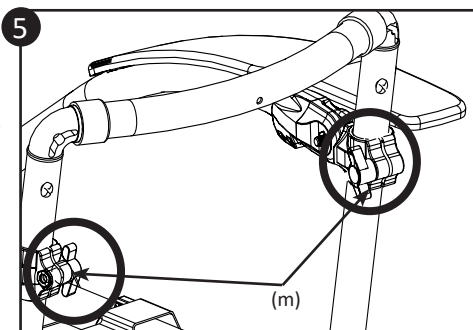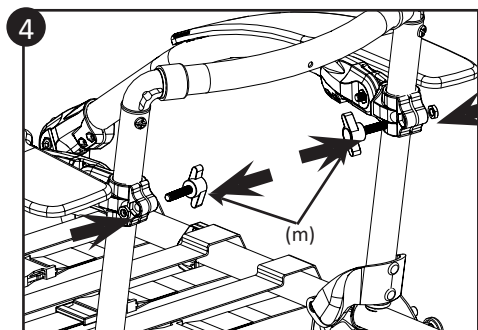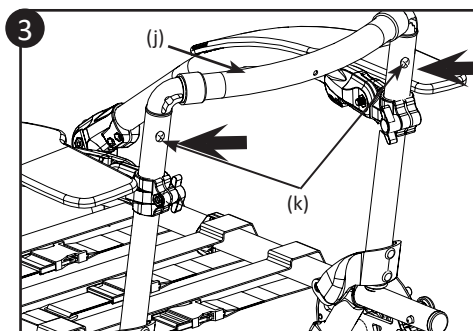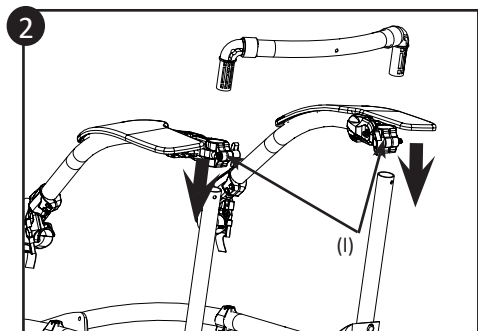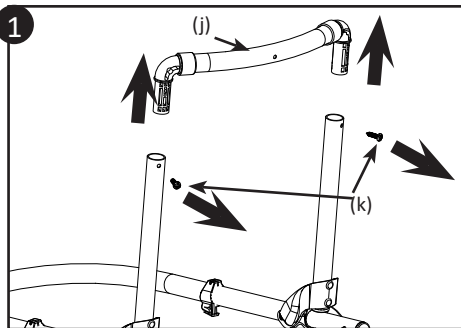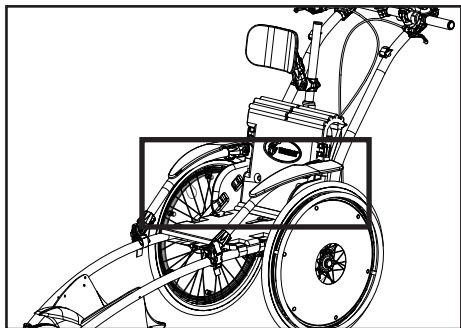

### 3.3 Montaggio della coppia di braccioli (regolabile, retrattile e orientabile) (0007-00-02-R0 et 0007-00-02-BM)

- 1 Smontare la parte superiore dello schienale (j):  
-Svitare le 2 viti (k) con un cacciavite a croce.  
-Separare la parte superiore (j) dal resto dello schienale
- 2 Inserire gli attacchi superiori del bracciolo (l) nei tubi verticali dello schienale.



Attenzione: se devi montare un poggiatesta, non rimontare la parte superiore dello schienale e passa direttamente alla fase 4 .

- 3 Rimontare la parte superiore dello schienale (j) e riavvitare le 2 viti (k) nella parte superiore dello schienale.
- 4 Montare i braccioli, con l'aiuto della vite ad alette (m), sull'attacco superiore del bracciolo.
- 5 Regolare l'altezza dei braccioli con l'attacco superiore del bracciolo e stringere le 2 viti ad alette(t).
- 6 Passare la piccola cinghia intorno al tubo e bloccare la fibbia.

#### Controlli:

- Controlla che i braccioli siano posizionati sopra le ruote e che non ci sia attrito.
- Controlla che la vite ad alette si trovi nel lato interno dello schienale.
- Controlla che la parte superiore dello schienale sia completamente compresa tra i tubi verticali dello schienale.
- Controlla che le viti di serraggio siano strette e che lo schienale sia stabile.



Per sostituire tutte le cinghie, seguire il passaggio 4 a pagina 7.

*Il numero di serie è inciso nella parte inferiore dei due tubi dei braccioli.*







#### Codice QR :

Il tutorial per il montaggio di questa opzione è disponibile in video su Youtube.

#### Nome del tutorial:

TUTO #4 : Armrests - Accoudoirs



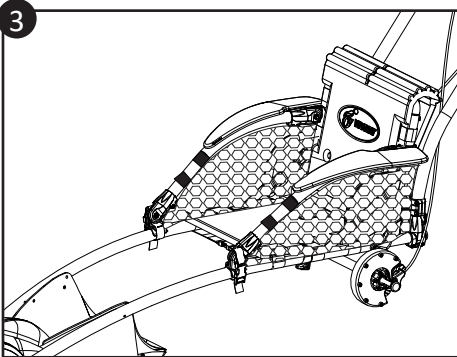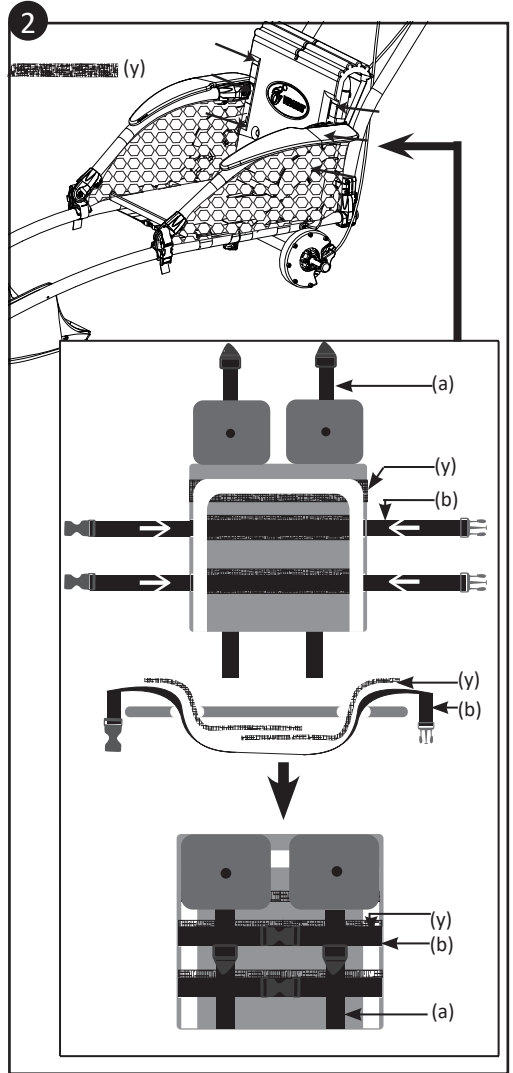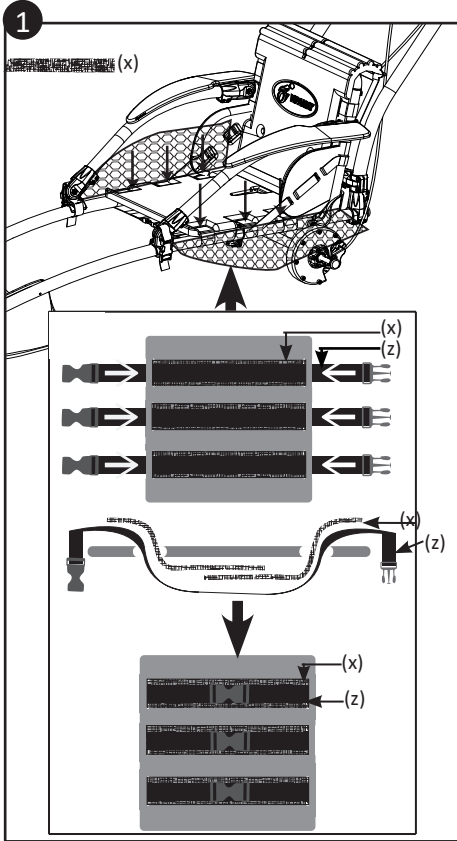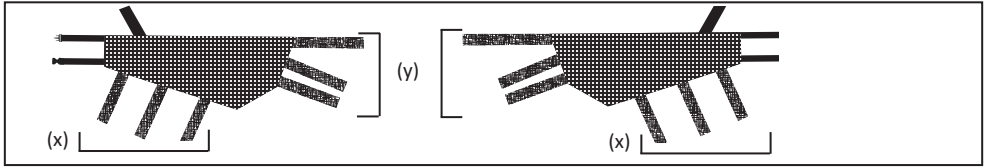



### 3.4 Montaggio delle reti dei braccioli (0032-00-01)

- 1 Far passare tutte le cinghie a strappo (x) di ciascun lato del sedile attraverso le fessure per le cinghie di fissaggio del sedile. Sbloccare le 3 cinghie (z) sotto il sedile e fissare le 3 cinghie (x) delle reti dei braccioli con gli strappi. Allacciare le 3 cinghie (z) sotto il sedile.
- 2 Far passare tutte le cinghie a strappo (y) su ciascun lato dello schienale nelle fessure per le cinghie di fissaggio dello schienale. Slacciare le cinghie (a) e (b) nella parte posteriore dello schienale e fissare le cinghie (y) delle reti dei braccioli con gli strappi. Allacciare le cinghie (a) e (b) dello schienale
- 3 Fissare le cinghie delle reti intorno ai tubi dei braccioli.

**Controlli:**

- Controlla la chiusura di tutte le fibbie della sedia.
- Controlla che le reti siano tese.

*Il numero di serie delle reti dei braccioli si trova sull'etichetta della confezione del prodotto.*










**Codice QR :**

Il tutorial per il montaggio di questa opzione è disponibile in video su Youtube.

**Nome del tutorial:**

TUTO #8 : Safety net part 1 - Filet d'accoudoirs, partie 2



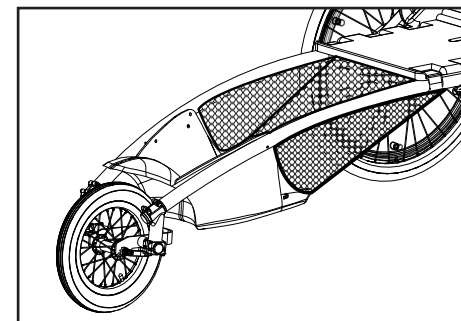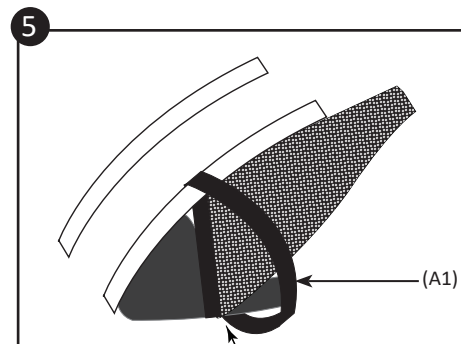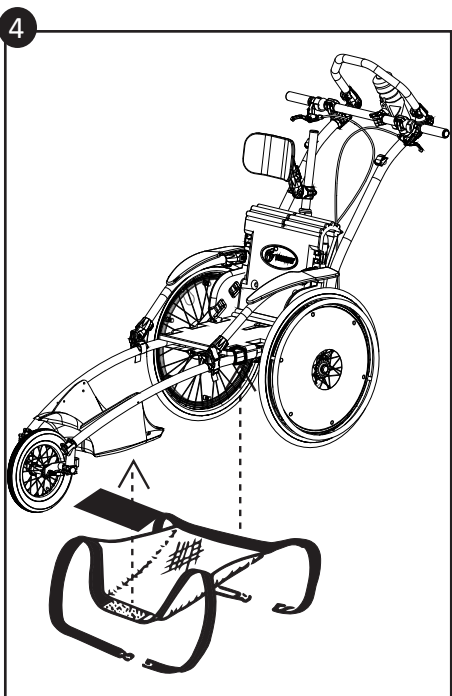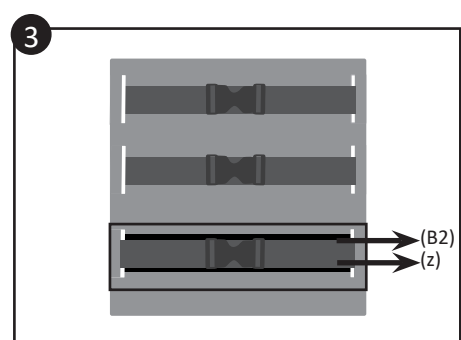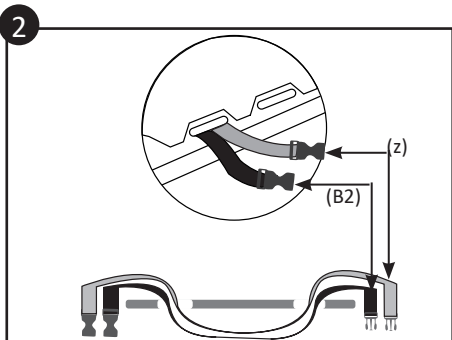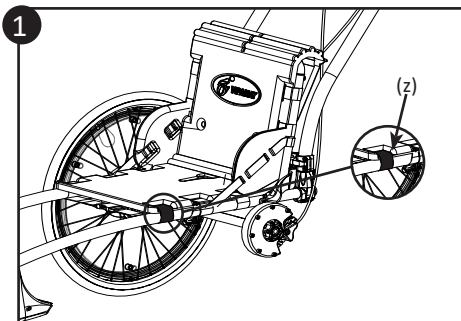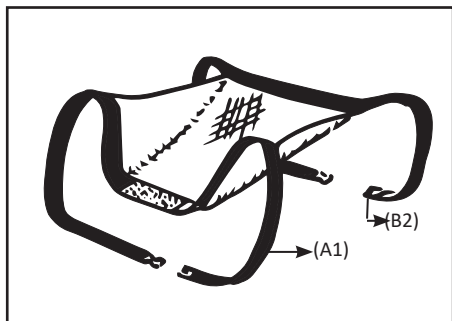

## 3.5 Montaggio della rete di protezione (0033-TS-01, 0033-TM-01, 0033-TL-01 ,0033-TX-01)

- 1 Sllacciare la cinghia (z) che si trova sotto il sedile di Hippocampe e sistemare la rete di protezione sotto il sedile.
- 2 Inserire la cinghia (B2) della rete di protezione sotto la cinghia (z) attraverso i passanti del sedile.
- 3 Allacciare le cinghie (B2) e (z).
- 4 Tirare la rete e attaccare la parte adesiva del velcro sotto il telaio.
- 5 Far passare la cinghia (A1) della rete di protezione intorno ai tubi dall'interno verso l'esterno e allacciare la cinghia.

### Controlli :

- Controlla che tutte le fibbie siano chiuse.
- Controlla che la rete sia tesa.

*Il numero di serie della rete di protezione si trova sull'etichetta della confezione del prodotto.*










### Codice QR :

Il tutorial per il montaggio di questa opzione è disponibile in video su Youtube.

### Nome del tutorial:

TUTO #7 : Safety net part 1 - Filet de protection, partie 1



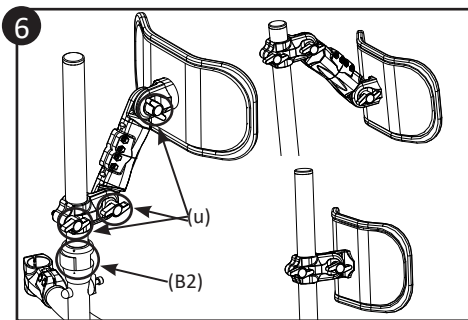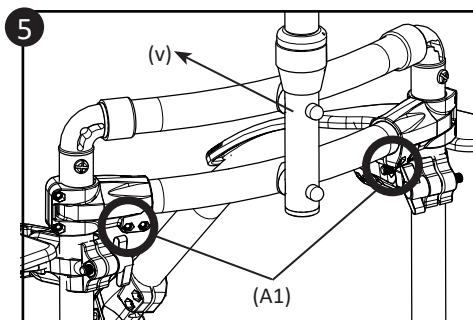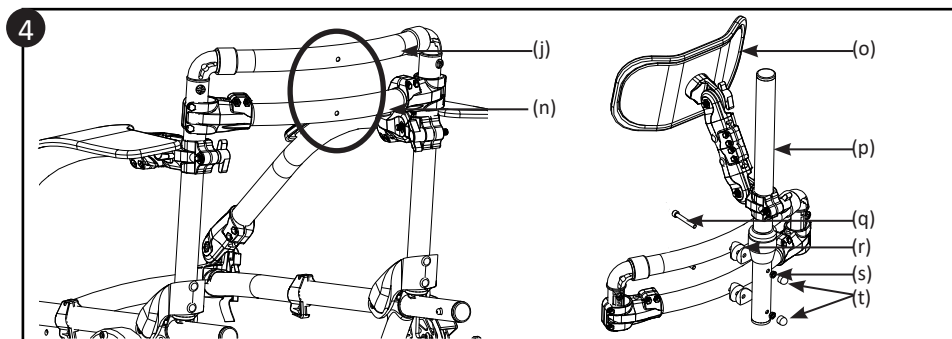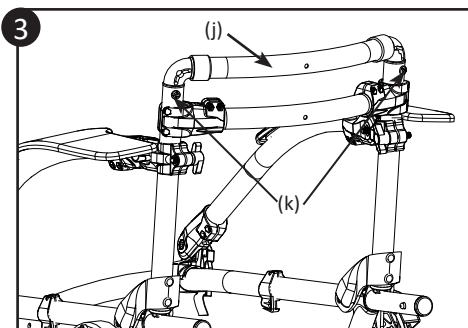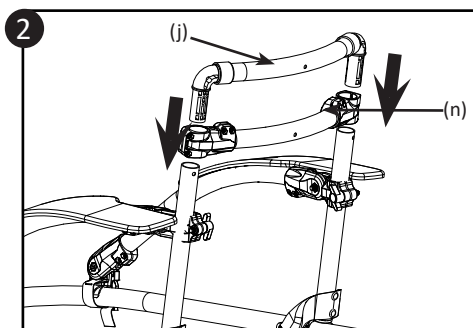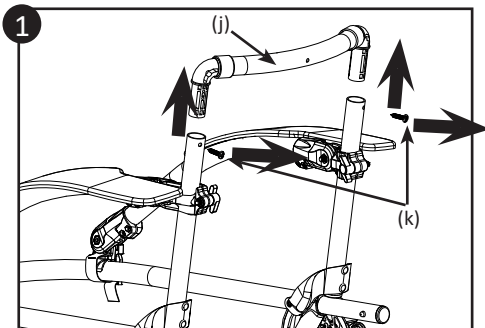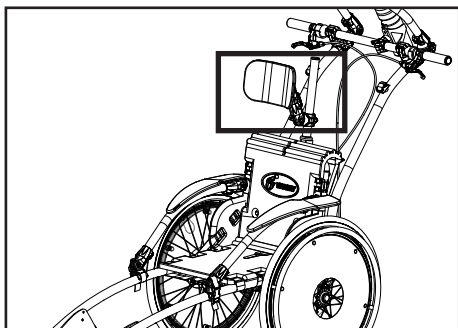

## 3.6 Montaggio dell'opzione poggiatesta regolabile (0008-00-05)

❶ Smontare la parte superiore dello schienale (j):

- Svitare le 2 viti (k) con un cacciavite a croce.
- Separare la parte superiore (j) dal resto dello schienale.

❷ Inserire la sbarra orizzontale (n) nei tubi verticali dello schienale; le sbarre (j) e (n) devono essere parallele.

❸ Rimontare la parte superiore dello schienale (j) e riavvitare le 2 viti (k) nella parte superiore dello schienale.

❹ Assemblare il tubo verticale (p) sulle due sbarre orizzontali (n) e (j).

Inserire le viti (q) nelle sbarre (n) e (j), poi nelle rondelle (r) e infine nel tubo verticale (p) del poggiatesta.

Posizionare il tubo (p) in verticale, quindi stringere le viti (q) con i dadi (s) con la chiave brugola e la chiave a forchetta in dotazione. Sistemare i cappucci dei dadi (t).

❺ Stringere le viti (A1) per bloccare il tubo nella posizione verticale (p).



Posizionare il tubo verticale in modo che l'apertura del push-lock avvenga con un movimento indietro.

### Controlli:

- Controllare che tutte le viti siano strette per bene.
- Controllare che non ci sia gioco nel poggiatesta.
- Controllare che il poggiatesta sia stabile e il push-lock sia bloccato

❻ Regolare il poggiatesta allentando le 3 mollette (u), quindi sistemare il poggiatesta nella posizione desiderata e stringere immediatamente le 3 mollette (u).

*Il numero di serie del poggiatesta è inciso sul tubo del poggiatesta.*

Per riporre o trasportare la tua sedia più facilmente puoi sollevare la parte superiore del tubo verticale (p) e il poggiatesta (o) (sbloccando il push-lock (B2)).

Nota: per i passeggeri che non hanno bisogno di regolare la posizione anteriore, è possibile fissare il bordo del poggiatesta (o) direttamente sul pezzo (p) rimuovendo il pezzo di estensione del poggiatesta.







### Codice QR :

Il tutorial per il montaggio di questa opzione è disponibile in video su Youtube.

### Nome del tutorial:

TUTO #5 : Adjustable headrest - Appui-tête réglable



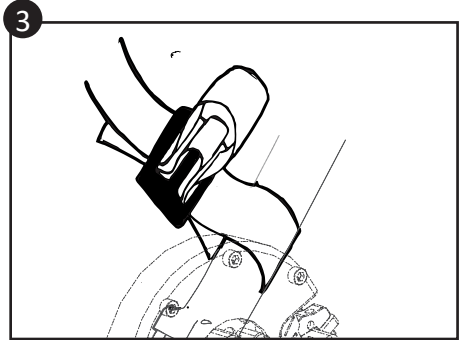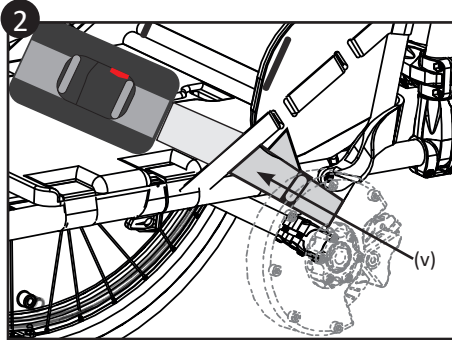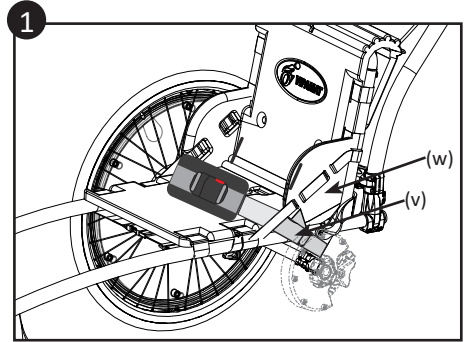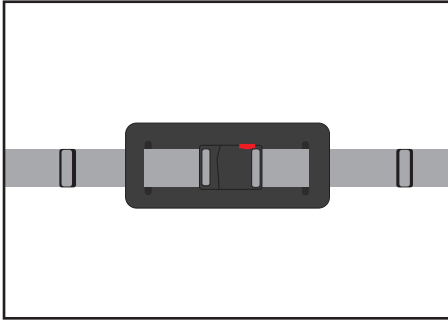






### 3.7 Montaggio dell'opzione cintura addominale (0024-00-01)

- ❶ Sistemare la cintura sul sedile e far passare la cinghia (v) all'interno della parte (w).
- ❷ Sistemare la cinghia (v) in modo da circondare il tubo del telaio dall'esterno verso l'interno.
- ❸ Far passare di nuovo la cinghia nel passante facendola uscire di almeno 2 cm, quindi stringere.

**Controlli:**

- Controlla che la cintura sia saldamente fissata al telaio di Hippocampe.

*Il numero di serie della cintura si trova sull'etichetta della confezione del prodotto.*

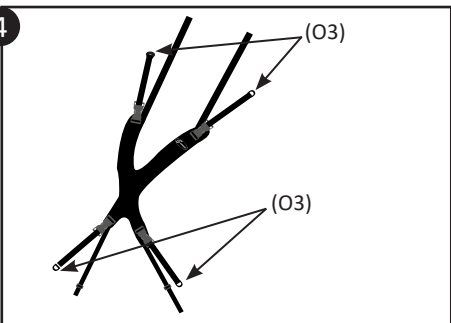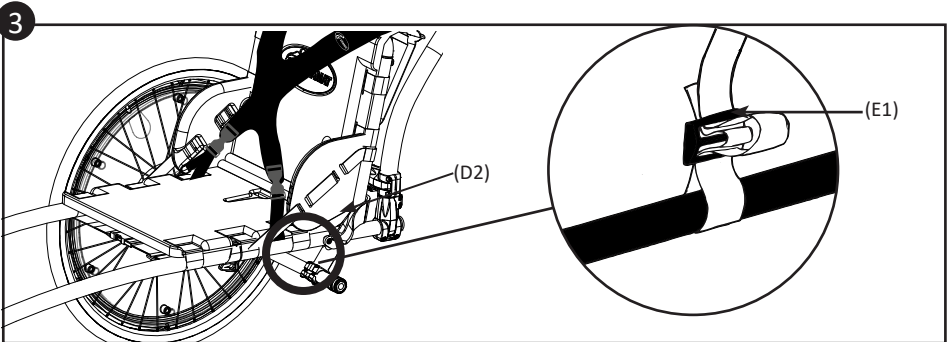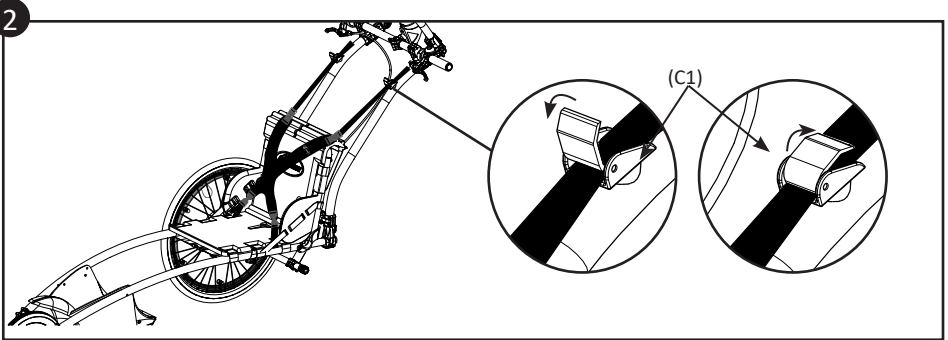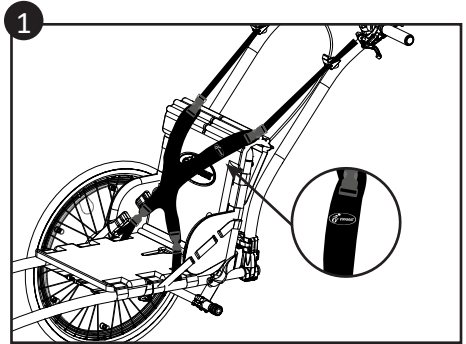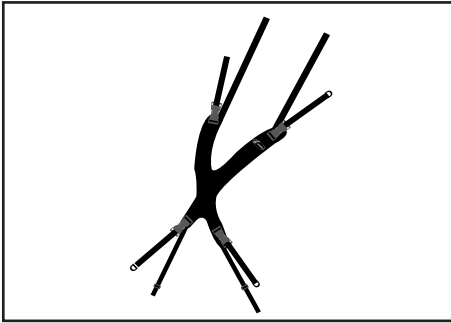



### 3.8 Montaggio dell'opzione imbracatura mista (0013-00-02)







- 1 Installare la cintura assicurandosi che il logo sia nella giusta posizione (logo in alto a destra) (cfr. immagine).
- 2 Aprire i ganci (C1) della maniglia di spinta. Far passare le cinghie superiori della cintura dal basso verso l'alto nei ganci (C1) della maniglia di spinta e bloccarli facendoli scivolare verso l'alto.
- 3 Far passare le cinghie inferiori all'interno della parte (D2) del sedile, quindi girare intorno al tubo del telaio. Far passare di nuovo la cinghia attraverso il passante (E1) facendola fuoriuscire di almeno 2 cm, quindi bloccarla.
- 4 Utilizzare le fibbie (O3) per regolare l'altezza e la tensione dell'imbracatura.

#### Controlli:

- Controlla la direzione della cintura.
- Controlla la chiusura delle cinghie tirando da ciascun lato di ciascuna fibbia.



*Il numero di serie della cintura si trova sull'etichetta della confezione del prodotto.*

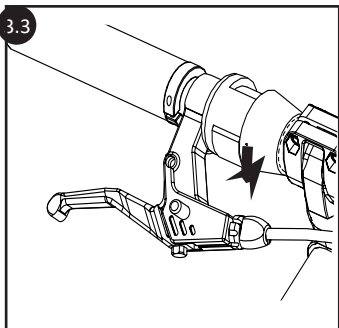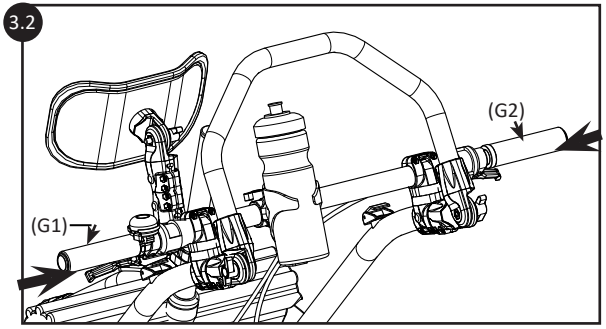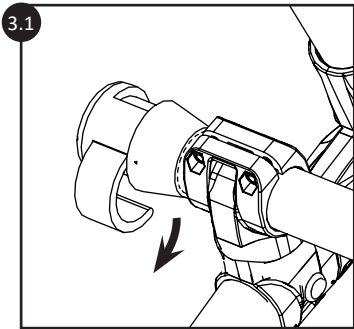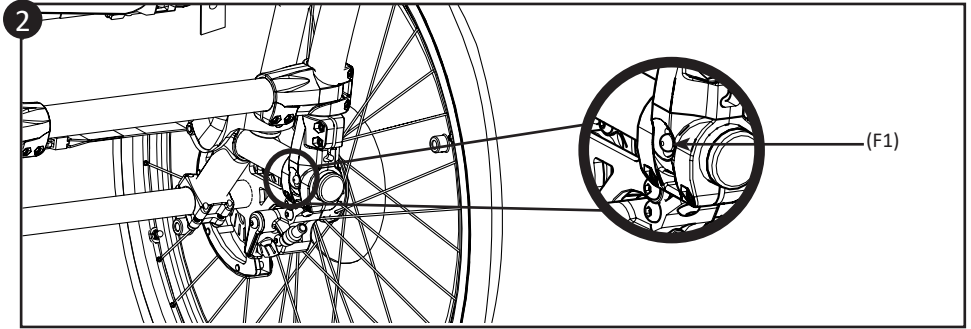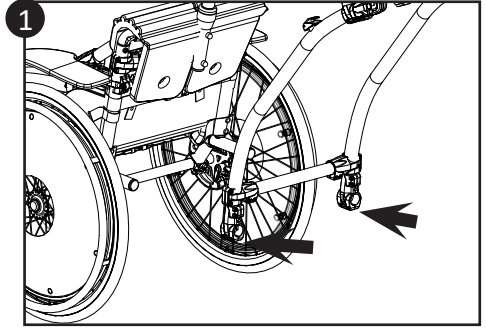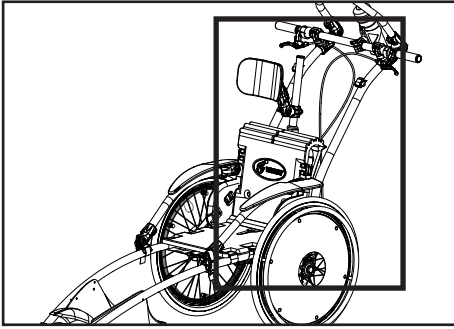

## 3.9 Montaggio della sbarra di spinta (0041-00-01-NO)

- ❶ Inserire le 2 staffe della sbarra di spinta nei tubi del telaio fino a raggiungere i ganci.
- ❷ Premere i 2 ganci (F1) contemporaneamente in modo da spingere la sbarra di spinta, i 2 ganci (F1) devono duoriuscire nuovamente.

**Controlli:**

- Accertati che la sbarra di spinta sia bloccata facendo pressione sul gancio e controllandone l'uscita.

❸ Montaggio delle maniglie dei freni sulla sbarra di spinta:

3.1 Sbloccare il push-lock.








3.2 Inserire la maniglia sinistra (G1) sulla quale è fissato il campanello, quindi chiudere il push-lock e inserire la

maniglia destra (G2) e chiudere il push-lock.

3.3 Controlla che tutti i push-lock siano bloccati.

**Controlli:**

- Le maniglie devono essere fissate saldamente sulla maniglia di spinta. Tirare la maniglia verso l'esterno per accertarsi che sia chiusa.

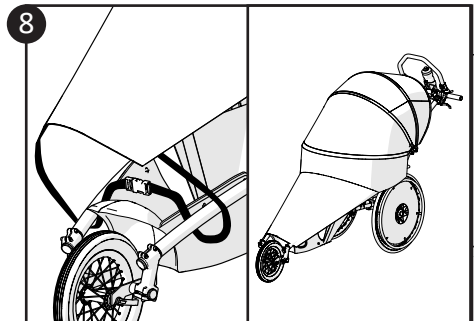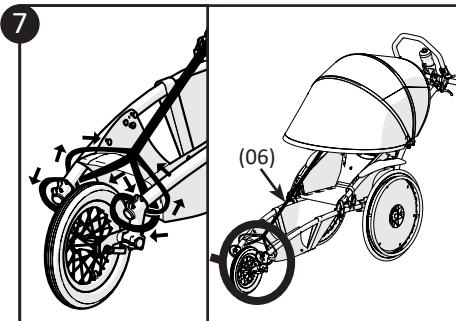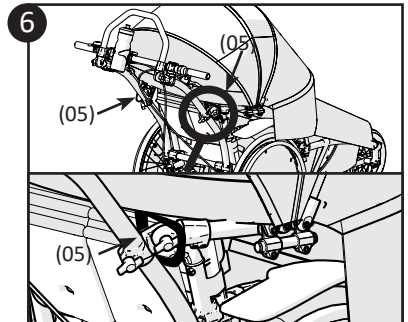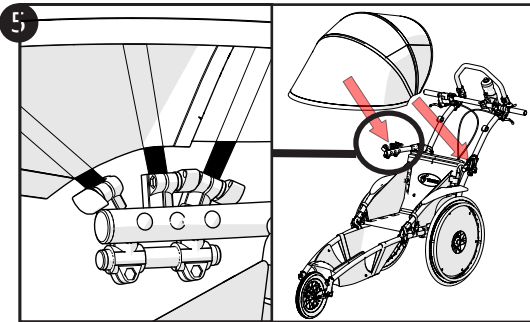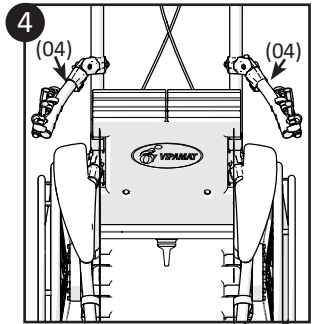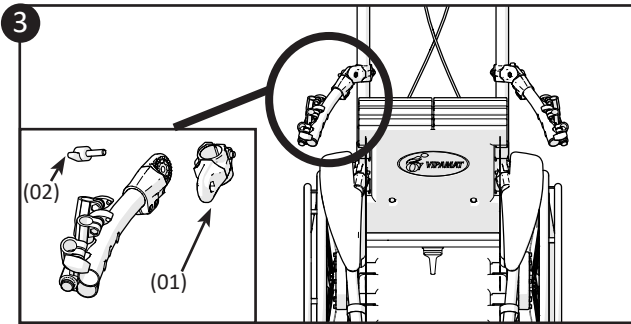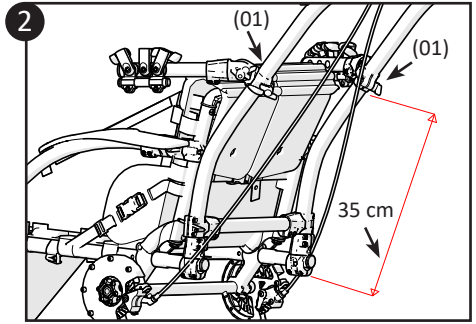

### 3.10 Montaggio della protezione dalle pioggia (0160-TM-02) (0160-TL-02) (0160-TX-02)

- ❶ Per montare l'opzione Protezione dalle pioggia, preparare tutte le parti come mostrato nella foto.
- ❷ Aprire i due pezzi elastici (01) e metterli sulla barra di spinta ad un'altezza di 35 cm dall'estremità inferiore della barra di spinta (destra e sinistra). préparer toutes les pièces comme sur la photo.
- ❸ Serrare le viti ad alette (02).
- ❹ I due supporti della Protezione dalle pioggia (04) devono essere rivolti verso l'alto e lontano dalla sedia a rotelle.
- ❺ Installare i 3 tappi di chiusura su ogni lato in ogni supporto della Protezione dalle pioggia (04).
- ❻ Bloccare le due cinghie (05) alla parte posteriore dei supporti della Protezione dalle pioggia (04).



Chiedere le due parti della Protezione dalle pioggia per fare un solo set. L'etichetta Vipamat della Protezione dalle pioggia deve essere rivolta verso la parte anteriore della sedia a rotelle.






- ❼ È possibile installare solo la parte superiore della Protezione dalle pioggia fissando la cinghia anteriore (06) come mostrato in figura:

In alto, sotto l'etichetta, far passare la cinghia nel pulsante magnetico.

Nella parte inferiore, passare la cinghia :

- All'interno dei tubi del telaio ;
- Girare intorno alle parti grigie nella parte anteriore;
- Torna indietro dal retro;
- Passare davanti al primo giro della cinghia
- Ritorno al punto di fissaggio dall'esterno dei tubi del telaio  
(non installare questa cinghia se la protezione delle gambe è installata)

- ❽ Per installare la protezione delle gambe, legare la parte inferiore della protezione intorno ai tubi del telaio dall'esterno verso l'interno.

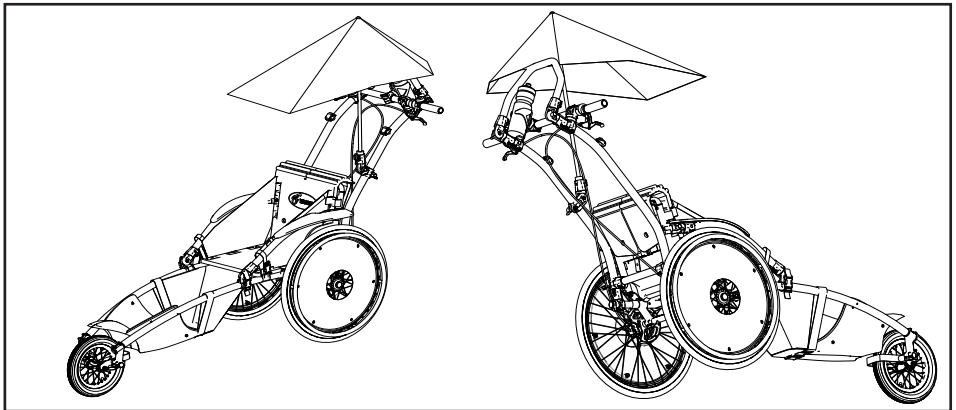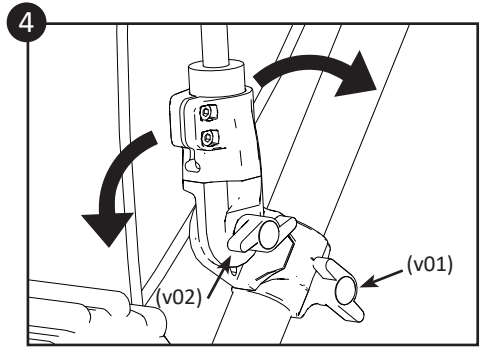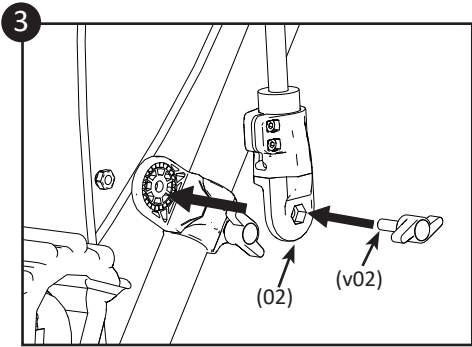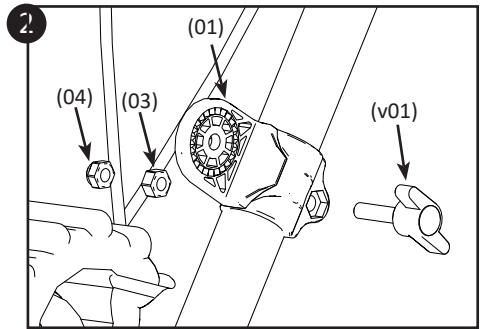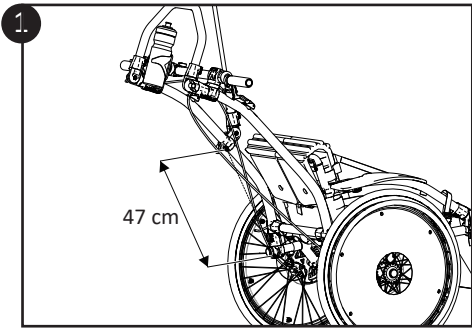

### 3.11 Montaggio dell'ombrello (0162-00-02)

① Aprire l'elastico (01) e posizionarlo sulla barra di spinta ad un'altezza di circa 47 cm dall'estremità inferiore della barra di spinta (destra o sinistra).



Per un migliore orientamento del parasole asimmetrico, la parte (01) va sempre posizionata con il lato di collegamento piatto verso sinistra (quando è sulla sella).

② Serrare il dado ad alette (v01) sul componente (01) per fissarlo all'asta di spinta. Passare attraverso il dado (03) e il contro dado (04).

③ Serrare la vite ad alette (v02) dell'estremità dentata del parasole (02) sulla parte piatta della parte (01) e serrarla sul dado dietro la parte dentata.

④ Per regolare il parasole a proprio piacimento, allentare e stringere la vite ad alette del parasole (v02) e la vite ad alette della parte (v01).











#### Codice QR :

Il tutorial per il montaggio di questa opzione è disponibile in video su Youtube.

#### Nome del tutorial:

TUTO #10 : Umbrella - Ombrella



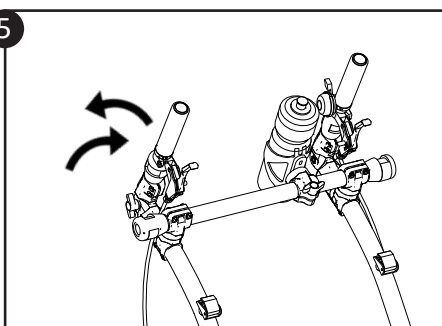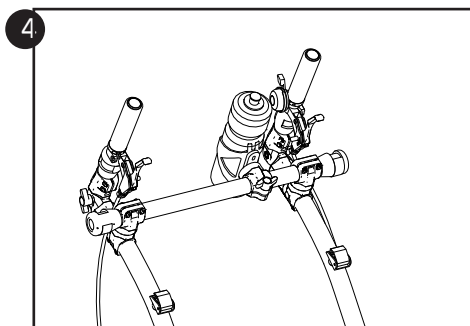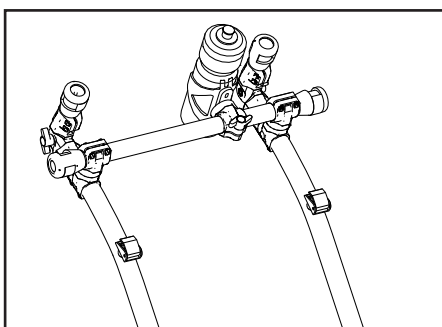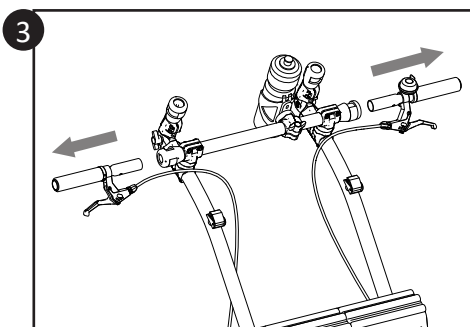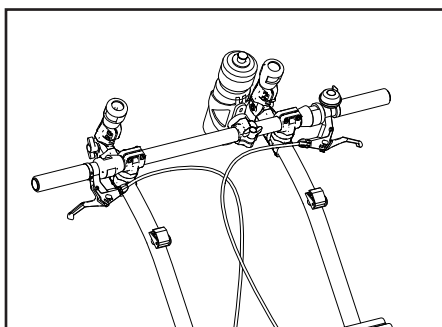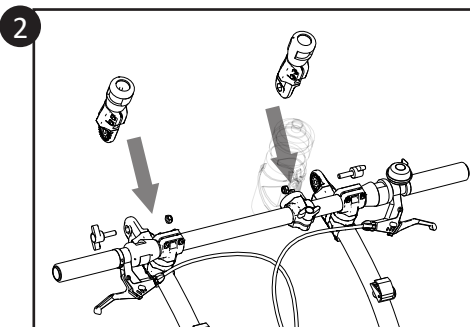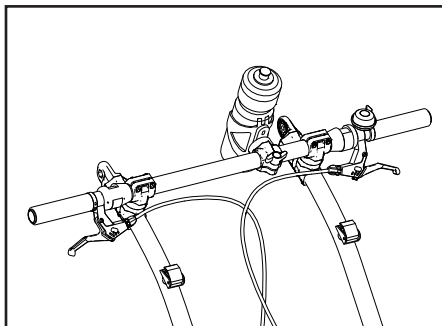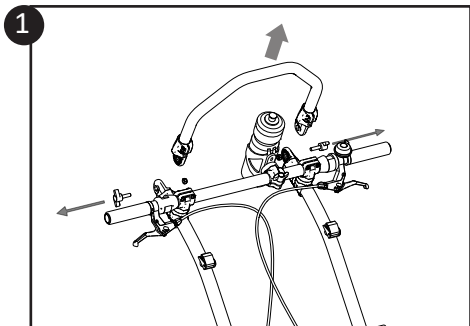



## 3.12 Montaggio della maniglia barra manubrio (0048-00-01)

- 1 Rimuovere la barra superiore dalla barra di spinta.
- 2 Avvitare i due pezzi intermedi al posto della barra (le due viti da 5 mm verso la parte anteriore).
- 3 Aprire i blocchi di spinta sul manubrio per sganciare le due maniglie rosse dei freni. Le maniglie devono essere collegate alla carrozzina solo tramite il cavo del freno. Chiudere le chiusure a pressione (04)
- 4 Inserire le maniglie rosse dei freni su entrambi i lati nei pezzi intermedi.
- 5 Allineare le maniglie con l'angolo di inclinazione desiderato mediante la vite a testa zigrinata.

### Controlli:

- Controllare l'efficienza dei freni.
- Verificare che i blocchi di spinta siano chiusi.
- Verificare che gli elementi intermedi (03) siano ben fissati.







*Il numero di serie è riportato sulla confezione delle parti intermedie.*



### Codice QR :

Il tutorial per il montaggio di questa opzione è disponibile in video su Youtube.



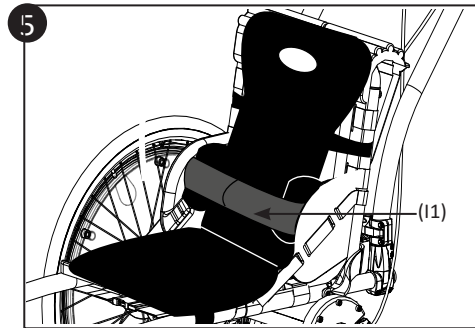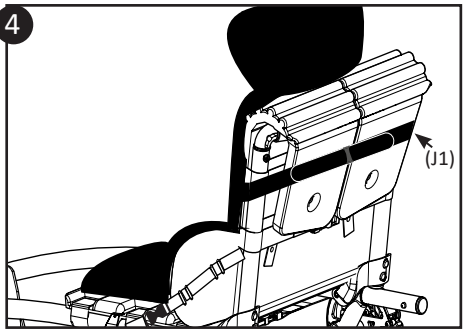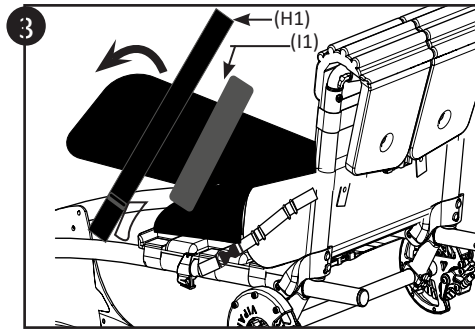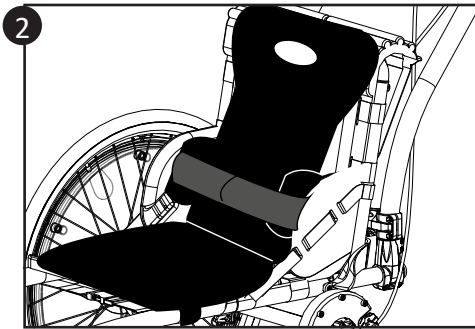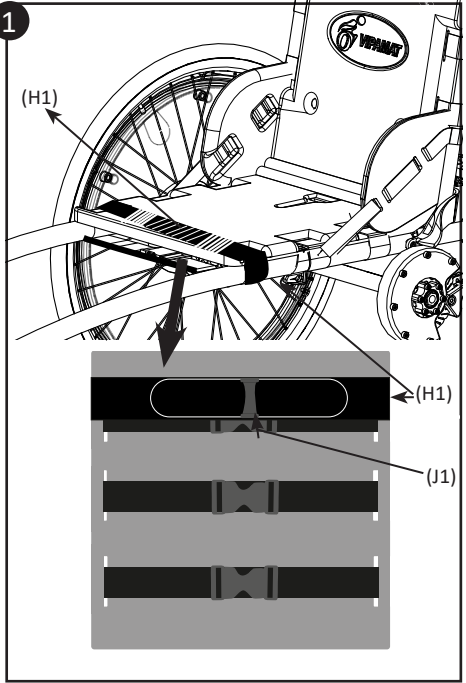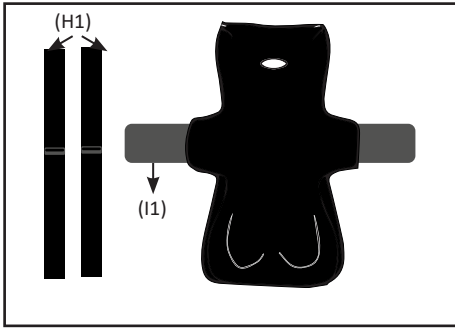

### 3.11 Montaggio dell'opzione Cuscino Sedile Comodo con due strappi (0050-TS-01, 0050-TM-01,0050-TL-01) su Hippocampe

❶ Sistemare la cinghia allacciante (H1) sul sedile di Hippocampe con l'allaccio (tratteggiato nella figura verso l'alto Chiudere la cinghia a strappo (H1) facendo passare la cinghia attraverso il passante (J1), quindi fissarla sulla parte di "velluto" della fascia auto allacciante..

**Controlli:**

- Assicurati che la cinghia a strappo sia tesa e ben fissata.

❷ Sistemare il Sedile Comodo sulla cinghia auto allacciante posizionata sul sedile di Hippocampe. Il Sedile va fissato sull'allacciatura della fascia auto allacciante.

❸ Inclinare in avanti lo schienale del Sedile Comodo e sistemare la seconda fascia auto allacciante (H1) sulla parte superiore dello schienale del Sedile.

❹ Girare intorno allo schienale di Hippocampe, poi chiudere la cinghia auto allacciante (H1) facendo passare la cinghia attraverso il passante (J1), quindi fissarla sulla parte a strappo della fascia auto allacciante












❺ Regolare la cintura addominale (I1).

**Controlli:**

- Controlla che il Sedile Comodo aderisca bene a Hippocampe

Il Sedile Comodo a due strappi è un accessorio distribuito dall'azienda Vipamat ed è adattabile a Hippocampe. Per garantire la massima sicurezza durante l'uso, si prega di fare riferimento alle istruzioni specifiche di questo articolo.











## Note

| Symbole   | Signification                                 | Symbole   | Signification                  |
|---|---|---|--------------------------------|
|  | Dispositivi medici (Medical Device)           |  | Numero di modello              |
|  | Prima dell'uso leggere le istruzioni          |  | Numero di serie                |
|  | Marchio CE                                    |  | Peso massimo dell'utilizzatore |
|  | Avvertimento                                  |  | Data di produzione             |
|  | Non smaltire nel bidone dei rifiuti domestici |  | Latex free : Senza lattice     |
|  | Produttore                                    |   |                                |

Etichetta di identificazione :

L'etichetta di identificazione è attaccata al telaio della carrozzina.

Di seguito è riportato un esempio di etichetta.
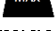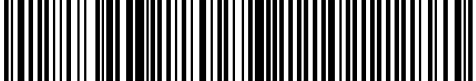
|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | VIPAMAT (www.vipamat.com)<br>3 rue Gustave Eiffel<br>56270 PLOEMEUR France<br>+33-297 862 487(Outside USA) | Made in France  |   |
|    |                          |  |  |
| <b>CHASSIS HIPPOCAMPE MARATHON</b><br><b>WHEELCHAIR MARATHON HIPPOCAMPE BLACK</b>  |  |   |   |
| <b>Ref</b>   | <b>0040-XX-03-XX</b>   | <b>Size</b>   | <b>XX</b>   |
| <b>Qt</b>  | <b>1</b>   |  | <b>220 Lbs</b>  |
| <b>SN</b>  | <b>000000</b>  | <b>LOT</b>  | <b>900000</b>   |
|   | <b>02/07/2002</b>  |  | <b>100 Kg</b>   |
| <br><b>(01)03664560000626(10)900000(21)000000</b> |  |   |   |

Numero UDI (Unique Device Identifier)

## Note

---

Scopri il nostro canale di tutorial su **Youtube**  
e segui le nostre notizie su **Facebook** e **Instagram**.



Vipamat



Vipamat  
World



Vipamat



**Note**

A series of 15 dashed black horizontal lines, evenly spaced, providing a template for handwritten notes.



# HIPPOCAMPE<sup>®</sup>

MARATHON<sup>®</sup> e Trail



Hippocampe Marathon e Trail



EN12-04-V2-IT\*25/07/2023



VIPAMAT

3, rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)

Tél : +33 2 97 86 24 87 - Fax : +33 2 97 86 73 81

[www.vipamat.com](http://www.vipamat.com) - [contact@vipamat.com](mailto:contact@vipamat.com)